



A RAPID IMMUNOASSAY TEST WITH RESULTS IN 20 MINUTES.

Bioline™ Rota/Adeno

20분 만에 모든 검사 및 결과
판독이 끝나므로 Rotavirus 및
Adenovirus 감염된 환자를
신속하게 격리하는데
효과적입니다.

Simple and Easy to Use

- 검사에 필요한 모든 기구가 함께 들어 있습니다.
- 소량의 분변으로도 검사가 가능합니다. (약 50mg)
- 검사 과정이 매우 간편하고 높은 정확도를 보입니다.

Rapid Result

- 20분 만에 검사 결과가 나옵니다.
- 신속한 검사 결과로 조기 진단을 통한 환자 격리가 가능합니다.
- 원내 감염을 줄일 수 있습니다.



Bioline™ Rota/Adeno

PERFORMANCE¹

- Bioline™ Rota/Adeno 동시 검사는 기존의 다른 제품과는 달리 20분 만에 검사 결과가 나오므로 신속한 검사 결과로 환자 진단에 도움을 드립니다.
- 검체의 전처리가 필요 없어 바로 검사가 가능합니다.
- 검사 과정이 매우 간편하여 어느 환경에서나 검사가 가능합니다.
- PCR과 검사 결과 일치도가 각각 95.8%, 94.0%로 매우 정확한 제품입니다.

VIRUS	ASSAY	ICA		
		POSITIVE AGREEMENT	NEGATIVE AGREEMENT	TOTAL AGREEMENT
Rotavirus	mRT-PCR	100% (64/64)	94.9% (319/336)	95.8% (383/400)
Adenovirus	mRT-PCR	71.4% (10/14)	94.8% (366/386)	94.0% (376/400)

출처: Annals of laboratory medicine, May 2014, Vol.34(3), pp.216-22

EASY TEST PROCEDURE

1 검체 삽입

검체희석액이 들어있는 튜브에 스왑검체를 넣고 10회 이상 섞어줍니다.



2 점적용마개 결합

점적용 마개를 튜브에 결합합니다.



3 검체 점적

검체 점적부위에 3-4 방울의 검체를 떨어뜨립니다.



4 결과판독

음성
C R A

Adenovirus 양성
C R A

Rotavirus 양성
C R A

Adenovirus
Rotavirus 동시양성
C R A

재검사
C R A C R A

20분 내에 결과를 판독합니다.



20분

ORDERING INFORMATION

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	SPECIMEN	PACKING UNIT
Bioline™ Rota/Adeno	14FK20	Fecal	20 Test / Kit

Abbott Rapid Diagnostics, Inc.

경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG 빌딩 5층 (13558)
TEL : 031-8014-6700 FAX: 031-8014-6799

ABBOTT.COM/POCT

Reference

1. Kim, Jayoung ; Kim, Hyun Soo ; Kim, Han-Sung ; Kim, Jae-Seok ; Song, Wonkeun ; Lee, Kyu Man ; Lee, Sunhwa ; Park, Kyoung Un ; Lee, Woochang ; Hong, Young Jun, "Evaluation of an immunochromatographic assay for the rapid and simultaneous detection of rotavirus and adenovirus in stool samples", Annals of laboratory medicine, May 2014, Vol.34(3), pp.216-22

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. Any photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photos is a model. L20005363-02, 01/20

